

GP POINTS, GP ONE POINTS, GP SUPER POINTS

VERWENDUNGSZWECK

Guttapercha-Spitzen werden als festes Wurzelkanalfüllmaterial zum Verschließen des Kanals während der Wurzelkanalbehandlung verwendet. Es handelt sich um ein nicht steriles Einwegprodukt.


VOR DER VERWENDUNG

- Nur für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch.
- Die Produkte werden unsteril geliefert und müssen vor der Verwendung aufbereitet werden.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Nicht verwenden, wenn das Gerät verbogen, gebrochen, rissig, zu hart oder nicht mehr elastisch ist.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder beeinträchtigt ist.
- Wählen Sie vor der Verwendung die für die Wurzelspitze geeignete Größe aus, um ein Überfüllen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum und stellen Sie sicher, dass das Produkt frei von Schmutz, Staub oder Fremdkörpern ist.
- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie sie.

Kontraindikationen

Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit oder allergischer Reaktion auf seine Bestandteile, einschließlich Hautausschlägen, Dermatitis oder anderen Hautreaktionen.

TECHNISCHE DATEN

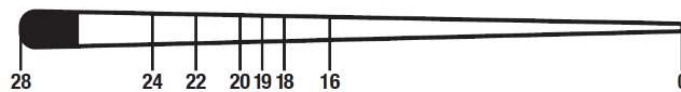

Modell	GP POINTS	GP ONE POINTS			GP SUPER POINTS				
Größen	15-80	R25	R40	R50	F1	F2	F3	F4	F5
Länge	28 mm	28 mm			28 mm				
Konizität	2%	6%	4%	4%	6%	6%	6%	5%	4%

Zusammensetzung

Guttapercha, Bariumsulfat, Zinkoxid, Zirkonoxid

ANWENDUNG

1. Nach der Vorbereitung des Wurzelkanals entfernen Sie überschüssige Feuchtigkeit mit einer saugstarken Papierspitze aus dem Kanal.
2. Wählen Sie eine Guttaperchaspitze mit der für den präparierten Kanal geeigneten Größe und Konizität aus.
3. Desinfizieren Sie die Guttaperchaspitzen gemäß dem Abschnitt „EMPFOHLENE VERARBEITUNGSMETHODE“.
4. Überprüfen Sie die Arbeitslänge vor dem Füllen des Wurzelkanals und schneiden Sie gegebenenfalls die überschüssige Spitze der Guttaperchaspitze ab.
5. Führen Sie die Guttaperchaspitze in den Wurzelkanal ein und machen Sie eine Röntgenaufnahme, um die korrekte Platzierung zu überprüfen: ca. 1 mm von der Wurzelspitze entfernt und mit dem Kanal ausgerichtet.
6. Entfernen Sie die Guttaperchaspitze und trocknen Sie sie mit einer saugstarken Papierspitze.
7. Tragen Sie Dichtungsmittel auf den Wurzelkanal auf, bestreichen Sie die Guttaperchaspitze mit Paste und führen Sie die Spitze dann wieder in den Kanal ein.
8. Bei Verwendung von thermoplastischer Guttapercha (Erhitzungsmethode):
 - Schneiden Sie die Guttaperchaspitze 5 mm von der Wurzelspitze entfernt ab.
 - Legen Sie die Guttaperchaspitze mit 0-Konizität in ein Guttapercha-Erhitzungsinstrument und stellen Sie die Temperatur auf 180 °C ein.
 - Erhitzen und erweichen Sie die Spitze, injizieren dann die erweichte Guttapercha in den oberen Teil des Wurzelkanals.
 - Tragen Sie Dichtungsmittel auf die Spitze auf, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.

Guttapercha-Spitzen

Gebrauchsanweisung

HINWEIS: Die oben genannten Schritte beschreiben die grundlegende Methode. Zahnärzte können das Verfahren, einschließlich der Anzahl der verwendeten Guttaperchaspitzen, an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassen.

WARNUNG: Achten Sie beim Auftragen von Dichtungsmittel oder Zement darauf, dass Sie nicht zu viel oder zu wenig auftragen. Das Material sollte sofort nach dem Auftragen verwendet werden.

EMPFOHLENE VERARBEITUNGSMETHODE

Zur Desinfektion von Guttaperchaspitzen wird empfohlen, diese 1 Minute lang in eine 5,25% Atrium Hypochlorit-haltige Lösung (NaClO) einzutauchen.

LAGERUNG: Nicht in direktem Sonnenlicht lagern, sondern an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort, fern von reizenden Gasen. Temperatur: 16 – 30 °C. Luftfeuchtigkeit: 10–90 %.

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie gebrauchte Guttaperchaspitzen gemäß den örtlichen Vorschriften für klinische Abfälle.

HALTBARKEIT: 4 Jahre

SYMBOLE

SYMBOL	BESCHREIBUNG	SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Hersteller		Enthält kein Naturkautschuklatex
	Importeur		Temperaturgrenze für Lagerung, Transport und Verwendung: 16–30 °C
	Vertrieb		Feuchtigkeitsgrenze: 10–90 %
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU		Katalognummer
	Medizinprodukt		Einmalige Produktkennung
	CE-Kennzeichnung		Chargennummer
	Nicht wiederverwenden		Herstelldatum
	Nicht steril		Verfallsdatum

CE 1639



Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd.
Nr. 408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport
Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Provinz Sichuan, 610207
Volksrepublik China

EU REP

Riomavix S.L.
Calle de Almansa 55,
1D
Madrid 28039
Spanien



Premium Plus Poland sp. z o.o.
ul. Bukowska 27
62-081 Wysogotowo
Polen
Tel.: 48-61-880-1094
E-Mail: info@premiumpluspl.com

Dental Contact Vertriebs KG
Im Spiet 101
D 26506 Norden
Telefon 04931 9809681
order@dental-contact.de
www.dental-contact.de