

Papierspitzen

Gebrauchsanweisung

PP Points, PP ONE Points, PP SUPER Points

VERWENDUNGSZWECK


Saugstarke Papierspitzen werden zum Trocknen, Reinigen und Absorbieren von Flüssigkeiten im Wurzelkanal während der Wurzelkanalbehandlung verwendet.

Es handelt sich um ein nicht steriles Einwegprodukt.

VOR DER VERWENDUNG

- Nur für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch.
- Die Produkte werden unsteril geliefert und müssen vor der Verwendung mit einer geeigneten und validierten Sterilisationsmethode sterilisiert werden.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Nicht verwenden, wenn Verfärbungen festgestellt werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder beeinträchtigt ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Länge und Größe der saugstarken Papierspitze dem präparierten Wurzelkanal und den ausgewählten Guttaperchaspitzen entsprechen.
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie sie.

TECHNISCHE DATEN

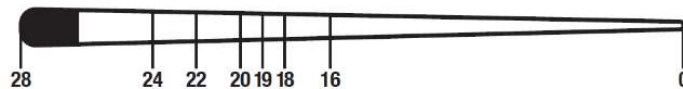

Modell	PP POINTS	PP ONE POINTS			PP SUPER POINTS				
Größen	15-80	R25	R40	R50	F1	F2	F3	F4	F5
Länge	28 mm	28 mm			28 mm				
Konizität	2%	6%	4%	4%	6%	6%	6%	5%	4%

Zusammensetzung
Faserstoff, Zellstoff

ANWENDUNG

- Wählen Sie eine saugstarke Papierspitze, die der Größe und Konizität des präparierten Wurzelkanals entspricht.
- Führen Sie die Papierspitze in den Wurzelkanal ein, um Blut, Feuchtigkeit oder Rückstände vor der Obturation mit Guttaperchaspitzen zu absorbieren.
- Papierspitzen sollen in derselben Größe und Konizität wie die entsprechenden Guttaperchaspitzen verwendet werden.

EMPFOHLENE STERILISATIONSMETHODE

Dampfsterilisation (Autoklav) gemäß den örtlichen klinischen Protokollen.

LAGERUNG: Nicht in direktem Sonnenlicht lagern. An einem kühlen, trockenen Ort in einem verschlossenen Behälter.

Temperatur: 5 – 30 °C.

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie gebrauchte Papierspitzen gemäß den örtlichen Vorschriften für klinische Abfälle.

HALTBARKEIT: 3 Jahre

Papierspitzen

Gebrauchsanweisung

SYMBOLE

SYMBOL	BESCHREIBUNG	SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Hersteller		Nicht steril
	Importeur		Temperaturgrenze für Lagerung, Transport und Verwendung: 5–30 °C
	Vertrieb		Katalognummer
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU		Einmalige Produktkennung
	Medizinprodukt		Chargennummer
	CE-Kennzeichnung		Herstelldatum
	Nicht wiederverwenden		Verfallsdatum



Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd.
Nr. 408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport
Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Provinz Sichuan, 610207
Volksrepublik China



Riomavix S.L.
Calle de Almansa 55,
1D
Madrid 28039
Spanien



Premium Plus Poland sp. z o.o.
ul. Bukowska 27
62-081 Wysogotowo
Polen
Tel.: 48-61-880-1094
E-Mail: info@premiumpluspl.com

Dental Contact Vertriebs KG
Im Spiet 101
D 26506 Norden
Telefon 04931 9809681
order@dental-contact.de
www.dental-contact.de