

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX GREENCLEAN

-
Die smarte Lösung zum Entfernen von
Alginat- und Gipsresten.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX GREENCLEAN

Wer wäre besser für die Herstellung einer Lösung für die Entfernung von Alginat- und Gipsresten geeignet als der Hersteller des „besten Alginats der Welt“? Cavex GreenClean beweist das. Dank der speziellen Formel können Abdrucklöffel, Spatel und Instrumente schnell und einfach gereinigt werden.

Das Geheimnis von Cavex GreenClean

Es kann eine mühsame Aufgabe sein, Alginat oder Gips von Abdrucklöffeln und Instrumenten zu entfernen. Abkratzen oder Schleifen ist nicht nur zeitaufwändig, sondern kann auch dauerhafte Schäden an Abdrucklöffeln und Instrumenten verursachen. Mit Cavex GreenClean gehört das der Vergangenheit an. Die Formel wurde speziell entwickelt, um die organische Matrix des Alginats oder Gipses aufzubrechen, wodurch sich alle Rückstände vollständig auflösen.

Anwendung

Geben Sie zwei Messlöffel Cavex GreenClean in einen Behälter Ihrer Wahl mit einem halben Liter lauwarmem Wasser. Entfernen Sie alle losen Rückstände und tauchen Sie die Abdrucklöffel und Instrumente 15-

Eigenschaften

- **Schnell, effektiv und einfach in der Anwendung**
- **Erfrischender Duft nach Zitrusfrüchten**
- **Biologisch abbaubar**
- **Hautfreundlich**
- **pH-neutral**
- **Wirtschaftlich: 1 kg reicht zur Reinigung von bis zu 500+ Löffeln**

30 Minuten lang in die Lösung. Einfach mit Wasser abspülen und schon sind die Abdrucklöffel und Instrumente sauber und sehen aus wie neu. Warmes Wasser oder ein Ultraschallbad beschleunigen den Vorgang noch. Mehr als 500 Instrumente können mit einer Packung Cavex GreenClean gereinigt werden. Neben der Wirksamkeit und praktischen Anwendung ist dieses Produkt daher auch sehr wirtschaftlich im Gebrauch.

pH-neutral und umweltfreundlich

Cavex GreenClean reagiert nur mit den Alginat- oder Gipsresten, nicht aber mit den Löffeln und Instrumenten selbst. Diese bleiben, genau wie die Haut, intakt und unbeschädigt. Die Lösung ist pH-neutral und zu 100% biologisch abbaubar. Daher kann sie nach Gebrauch im Waschbecken entsorgt werden. Einfach und verantwortungsbewusst, das ist es, was Cavex GreenClean ausmacht.



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Die Niederlande | cavex.nl

CAVEX

ZYH001D.06