

PREMIUM ORAL CARE

CAVEX OUTLINE

-
Eine perfekt "sitzende"
Totalprothese – dank
verformungsfreier Abformung
der Schleimhaut

Eugenolfreie Abformpaste für
die individuelle Abformtechnik.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ORAL CARE

CAVEX OUTLINE

Präzise Abformungen – Eugenolfrei

Seit der Einführung des neuen Cavex Outline gehören Schleimhaut-reizungen der Vergangenheit an. Cavex Outline schafft die präzise Grundlage für eine funktionsgerechte Unterfütterung einer Vollprothese. Ohne Schleimhautreizungen und ohne den bisherigen unangenehmen Geruch. Das ist angenehm für Patienten und Zahnarzt.

Ideale Konsistenz – optimale Endhärte

Cavex Outline ist thixotrop – d.h. es ist zunächst standfest, fließt aber unter leichtem Druck. So wird die Schleimhaut nicht verdrängt. Die Abbindezeit erlaubt ausreichende Kieferbewegungen. Nach dem Abbinden ist Cavex Outline unelastisch, so dass es sich beim Herausnehmen aus dem Mund nicht verformt. So erhält der Zahnarzt eine präzise leicht lesbare (blaue) Abformung. Die Mundfeuchtigkeit des Patienten bewirkt einen Snap-Set, der innerhalb von ca. 3 Minuten zu einer stabilen Abformung führt, die sich bequem und sicher schneiden lässt. Cavex SiliconA bite ist aufgrund des hohen Füllungsgrades scanbar.

Nicht klebend, leicht zu dosieren, kostengünstig

Cavex Outline hinterlässt keinerlei Rückstände auf der Mundschleimhaut. Die Abformung schrumpft nicht und ist mindestens 7 Tage lang dimensionsstabil. Die Komponenten (Base blau, Katalysator weiß) lassen sich präzise und sparsam dosieren und mischen. Ein Adhäsiv ist nicht erforderlich. Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre.



Eigenschaften

- Paste/Paste System. Blaue und weiße Paste für homogenes Anmischen innerhalb von nur 30 Sekunden
- Niedrigviskos für präzise Darstellung der Schleimhaut
- Eugenolfrei - angenehmer Duft

Lieferumfang:

2 Tuben (weiße und blaue Paste) 140 g / 65 g

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

ZYH005D.00